

Asiakastiedote 11/2020

1.10.2020

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat

Ammonium-ioni

fP-NH₄-ion KL 1071

Muutokset koskevat Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Muutamme fP-NH₄-ion -näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi.

Säilytys ja lähetys

Kylmänäytteenotto ilman staasia. Sekoitettu näyte laitetaan heti jäämurskaan. Kylmäseparointi, plasma erotellaan välittömästi ja pakastetaan.

Näyte säilyy 2 h jääkaapissa (2-8°C) ja pakastettuna (-20°C) korkeintaan **3 päivää**. Näyte on lähetettävä tutkittavaksi mahdollisimman pian. Näytteen kuljetus pakastettuna (-20°C).

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi