

Asiakastiedote**47/2021****5.11.2021**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,**Tekopaikkamuutos****Cryptosporidium, Cyclospora (ja Cystoisospora) värjäys
F -CrypVr KL 3444**

Muutokset koskevat Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Tutkimus siirtyy tehtäväksi alihankintalaboratoriossa, minkä vuoksi näytteeseen liittyvä ohjeistus ja vastausaika muuttuvat.

Esitiedot	Lähetteeseen merkitään tiedot potilaan oireista ja matkoista (kohde ja ajankohta).
Näyteastia	900412 Ulostepurkki, formaliini
Näyte	Uloste vellitetään hyvin 10 % formaliiniin. Sekoitussuhteet: kiinteää ulostetta 1 osa + 5 osaa 10 % formaliinia; nestemäistä ulostetta 1 osa + 2 osaa 10 % formaliinia.
Säilytys ja lähetys	Näyte säilyy 3-7 vrk 10 %:ssa formaliinissa jääkaappilämpötilassa. Lähetys ympäristölämpötilassa tai kylmäkuljetuksena. Näyte ei saa jäätyä.
Menetelmä	Erikoisvärjäys (modifioitu Ziehl-Neelsenin metodi) ja mikroskopointi. Menetelmällä löytyy myös mahdollinen Cyclospora sp. ja Cystoisospora belli.
Vastausaika	6 arkipäivää
Tulkinta	Normaali tulos negatiivinen. Ookystien erittyminen voi olla ajoittaista, joten taudin poissulkemiseksi on suositeltavaa ottaa kolme näytettä 1 - 3 vrk välein.
	F-CrypVr-tutkimuksen voi korvata herkemällä F-ParaNho (KL 6375) -tutkimuksella, joka tunnistaa Cryptosporidiumin, mutta ei Cyclospora tai Cystoisosporaa.

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 22.11.2021 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi