

**Asiakastiedote 2/2018****8.1.2018****Arvoisa asiakas,****Päivitys näytteen käsittelyohjeeseen, Hemosideriini (kval), virtsasta**

U –Hemsi-O (KL 1572) menetelmämuutoksesta johtuen pyydämme esikäsittelemään näytteen alla olevan ohjeen mukaisesti, ennen lähetystä laboratoriolle.

**Näyte**

Huolella sekoitettua aamuvirtsaa, vähintään 10 ml (ilman säilöntäaineita).

**Näytteen käsittely**

Näytepreparaatti tulee valmistaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta. 10 ml virtsaa muoviputkeen, tämä sentrifugoidaan 10 min (2000rpm), kaada varovaisesti supernatantti pois. Sentrifugoidun virtsan sakkaa levitetään objektilasille.

Merkitse objektilasille (lasin mattapäähän) lyijykynällä tai liuottimen kestäväällä tussilla potilaan tunnistetiedot (potilaan nimi ja näyttenumero).

Fiksaatio: näyte kiinnitetään metanolissa 5 minuuttia, jonka jälkeen näytelasi ilmakuivataan.

**Näytteen säilytys ja kuljetus**

Sivelyvalmiste säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

**Tiedustelut:**

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi