

Asiakastiedote 3/2018**9.1.2018**

Arvoisa asiakas,

Päivitys tutkimuksen S –Prostataspesifinen antigeeni säilytysohjeeseen

S –PSA (KL 3642) näytteiden säilytys – ja lähetysohjetta päivitetään.
Uusi ohje on:

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa (2-8 °C) 48 h. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 °C).

Näytteen lähetys

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos se on perillä 24 h kuluessa näytteenotosta. Näyte lähetetään kylmässä, jos näyte on perillä 2 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin lähetetään pakastettuna.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi