

Asiakastiedote 5/2019
29.1.2019

Arvoisa asiakas,

Uusi käytäntö, Ihon IF- tutkimuksen tekopaikka sekä erikoisputkien tilaaminen muuttuu

Sk-PAD-IF, KL 4047: Ihon immunofluoresenssitutkimus

Näyteputki tilataan 1.2.2019 alkaen:

*Yhtyneet Medix Laboratoriot (SYNLAB) kotisivut /TARVIKETILAUSLOMAKE / Yleisiä tarvikkeita /
Näytetarvikkeet: Michelin kuljetusputki ihopatologian erikoisnäytteille (KL4047)*

Tilaaajan täytyy ensin rekisteröityä käyttäjäksi kotisivuilla: www.yml.fi/tarviketilaus

Rekisteröitymisen yhteydessä tarvitaan:

- Yrityksen nimi = SYNLAB
- Asiakasnumero = 26843 (käytä tätä numeroa, jotta maksu tulee SYNLAB Finlandille)
- Tilaaajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero = omat yhteystiedot tilaajalta

Putkien toimitus on nopeaa, joten on suositeltavaa tilata vain muutamia putkia kerrallaan.

Näytteiden lähettäminen:

Erikoisputkeen otettu näyte lähetetään suoraan tekopaikkaan:

SYNLAB/YML
Patologian laboratorio
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

HUOM! Näytteenoton jälkeen kuljetus **KYLMÄKULJETUKSENA** kahden vrk:n kuluessa. Kuljetus styrox- kuljetuspakkauksessa tai kylmägeelissä. Näytettä ei saa fiksoida formaliiniin.

Yhteydenotot IF-tutkimusta koskien:

Patologian ryhmävastaava: 050 4090866 **Elina Kaitainen**
Patologian erikoislääkäri **Anna Bützow** etunimi.sukunimi@medix.fi

Lisätietoja SYNLABin patologian toiminnasta antavat myös:

Patologian ylilääkäri
Tuula Kuukasjärvi
+358 40 7655165
etunimi.sukunimi@synlab.fi

Patologian ylihoitaja
Sirpa Koskinen
+358 40 8297432
etunimi.sukunimi@synlab.fi