

Asiakastiedote 2/2015**31.3.2015****Arvoisa asiakas,**

Tutkimukselle –HPV_{NhO}, KL 4075 otetaan käyttöön uusi tähän tutkimukseen sopiva näytteenottoväline. Uusi Copanin valmistama näytetikku on validoitu servikaalinäytteille ja on helppokäyttöinen koska erillisiä kuljetusnesteitä ei tarvita. Näyte pysyy analysointikelpoisena jääkaappilämpötilassa 7 vuorokautta. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä (säilyvyys 24 h).

Näyte: Yleensä tutkimus tehdään kohdunkaulakanavasta otetusta näytteestä. Näyte on mahdollista ottaa myös esim. vaginasta, muilta limakalvoilta tai näkyvästä leesioista lääkärin harkinnan mukaan.

Näytteenotto-ohje:

-Näyte otetaan ennen mahdollisia penslauksia.

-Ylimääräinen lima poistetaan vanutikulla.

-Näyte otetaan työntämällä Copanin servikaalitikki kohdunkaulakanavaan n. 2 cm:n syvyyteen. Tikkoa pyöritetään kanavassa riittävän näytemäärän varmistamiseksi.

-Näytteenoton jälkeen tikku siirretään kuljetusputkeen. Tikkaa ei pidä katkaista koska tikun pää toimii kuljetusputken korkkina.

Näytteenottovälineitä voitte tilata 1.4.2015 alkaen synlabin nettisivuilta www.synlab.fi tai asiakaspalvelusta.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.com