

Asiakastiedote 18/2015**17.11.2015****Uusi tutkimusmenetelmä tutkimukselle HPVnho****Arvoisa asiakas,**

Suuren riskin HPV-testi on tärkeä osa HPV-diagnostiikkaa. Hr-HPV-testaus toimii tehokkaasti hoidonjälkeisessä seurannassa sekä lisää papa-näytteeseen verrattuna herkkyyttä todeta residuaali tai uusiutunut High risk HPV-infektio. Hoitosuosituksen mukaisesti myös varmistettuja muutoksia voi seurata HPVnho-testillä hoidon jälkeen.

HPVnho-testi on ensisijaisesti tarkoitettu yli 35 vuotiaalle naisille. 35 vuotta nuoremmilla naisilla HPV-infektiot paranevat useimmiten itseksensä.

Tutkimus:**-Papilloomavirus, nukleiinihappo (kval)****-HPVnho KL 4075**

synlab Finland Oy tulee ottamaan uuden HPVnho-menetelmän käyttöön. Uusi menetelmä perustuu reaaliaikaiseen PCR-tekniikkaan ja se joka tunnistaa Käypä hoito-suosituksessa esitetyt suuren riskin HPV-tyypit. Menetelmä erottelee suuren riskin HPV 16 ja 18 sekä yhdistettynä muut tunnetut riskityypit (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ja 68).

Menetelmämuutoksen myötä uusi näytteenottoväline tulee olemaan Cervex-Brush Combi -harjapakkaus. Uudet näytteenottovälineet ovat tilattavissa synlabin nettisivuilta www.synlab.fi/tarviketilaus tuotenumeroilla 52980C. Aikaisemmin käytössä olleet nyloniset nukkatikut eivät sovellu uudelle menetelmälle.

Näyte:

HPV-näyte tulee ottaa ennen muita toimenpiteitä, pesuja tai penslauksia ja ennen sytologisen näytteen ottamista.

HPV-harjastikku työnnetään kohdunkaulakanavaan kevyesti painaen niin, että harjastikun kaikki sivusuuntaiset harjat ovat kosketuksissa kohdunsuun limakalvoa vasten. Harjastikkua pyöritetään kaksi kertaa myötöpäivään. Irrota ja jätä valkoinen harjasosa kuljetuspurkkiin. Sulje purkki tiivisti.

Näyte säilyy kuljetusnesteessä +2-30°C:ssa jopa 6 kuukautta.

Vastausviive:

Vastaus valmiina 3 arkipäivässä.

Muutos astuu voimaan 1.12.2015 alkaen.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi