

**Asiakastiedote 13/2020**  
**3.3.2020**

Sivu 1/1

**Arvoisa asiakas,**

### **Viitearvomuutos**

#### **Immunoglobuliini A, sekretorinen syljestä (3289 Se-IgASekr)**

Menetelmämuutoksen myötä tulemme päivittämään tutkimuksen Se-IgASekr viitearvoja perustuen laitevalmistajan antamiin viitearvoihin. Näytteen säilytys- ja lähetysvaatimukseen tulee myös muutoksia.

Uudet viitearvot ja säilytys-/lähetysvaatimukset otetaan käyttöön 9.3.2020 alkaen. SYNLABin tutkimusohjekirjassa kuvataan tarkemmin ohjeet (ohje päivitetään 9.3.2020 vastaamaan muutosta).

#### **Menetelmä:**

Entsyymi-immunologinen (EIA)

#### **Viitearvot:**

Nykyinen viitearvo 0,087-0,47 g/l

Uusi viitearvo 0,04-0,17 g/l

#### **Näytteen säilytys**

Enintään 24 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 °C). Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta.

#### **Näytteen kuljetus**

Kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä (2-25°C) jos voidaan varmistua, että näyte saapuu laboratorioon 24 tunnin sisällä näytteenotosta. Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna.

#### **Tiedustelut:**

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: [ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)