

Asiakirjan nimi

päivämäärä
Sivu 1 / 1

Aprotiniini (Trasylol) näytteenotto-ohje


Ohje koskee pyyntöjä fP-VIP 2932 (Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi) ja P-Glkg 4975 (Glukagoni, plasmasta).

Suosittellemme 12 tunnin paastoa ennen näytteenottoa.

VIP:lla ja glukagonilla on lyhyt puoliintumisaika, näin ollen EDTA-veri pipetoidaan stabilisaattoria (aprotiniiniä) sisältävään näyteputkeen.

Näytteenottoasetti sisältää seuraavat näytteenottovälineet:

1. EDTA-putki
2. Trasylol (stabilisaattoria sisältävä putki)
3. Erotteluputki

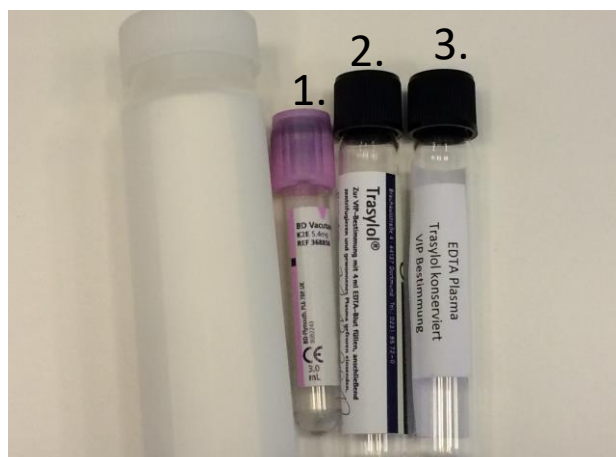

Näytteeksi soveltuu vain EDTA-plasma, näyte tulisi ottaa kylmänäytteenottona.

Näyte otetaan EDTA-putkeen. EDTA-putkesta pipetoidaan 4 ml EDTA-kokoverta Trasylol-stabilisaattoria sisältävään näyteputkeen. Sekoita näyte, sentrifugoi ja erotele plasma mahdollisimman nopeasti näytteenottoasetissä olevaan erotteluputkeen. Pakasta näyte välittömästi. Näyte tulee säilyttää pakkasessa vähintään 24 tuntia ennen lähetystä keskuslaboratorioon.

Mikäli näytteessä havaitaan hemolyysiä tai näyte sulaa matkan aikana, näytettä ei voida analysoida.

Trasylol-näytteestä voidaan määrittää ainoastaan fP-VIP ja P-Glkg.